

➤ Gesichtsschild / Face shield

bestehend aus 2 Teilen:

- Gesichtsschild
- größenverstellbares Befestigungsband

consisting of 2 parts:

- face shield
- size adjustable fastening strap

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG
Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg
Tel. +49(0) 931 / 40 41 6-0 · Fax: -100

www.sprintis.de · info@sprintis.de

A




Teil A:
Gesichtsschild
Part A:
face shield

B



Teil B:
größenverstellbares
Befestigungsband
Part B:
size adjustable
fastening strap

1

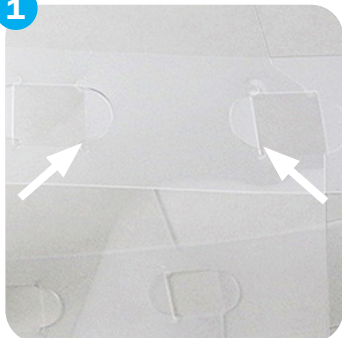

Verbinden Sie beide Teile miteinander. Dazu Teil A mit Hilfe der Einklemmflügel auf beiden Seiten in den quadratischen Öffnungen von Teil B fixieren.
Connect both parts. Therefore fix the clamping-wings of part A into the squared leak of part B.

2



Sobald das Schild fixiert ist, dieses leicht biegen. Das Material lässt sich biegen, ohne dass Bruchgefahr besteht.
Once the shield is fixed, bend face shield slightly. The material is bendable without risk of breaking.

3



Jetzt die gewünschte Größe einstellen ...
Now adjust your size ...

4



... und fertig ist das Gesichtsschild.
... and your face shield is ready.