

Lagerung

Das Gesichtsschild kann bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20 °C Raumtemperatur) problemlos gelagert werden.

Nutzung

Für das Aufziehen kann das Gummiband gespannt und über den Kopf gezogen werden. Für die richtige Positionierung die Kopfhalterung auf der Stirn platzieren. Nach der Nutzung das Gesichtsschild nach oben abziehen.

Reinigung

Für die Reinigung ein Tuch mit Wasser befeuchten und über die Sichtfläche des Schildes (innen und außen) drüber wischen. Danach mit einem trockenen Tuch die Sichtfläche reinigen.

Überprüfung

Es muss überprüft werden, ob sich Kratzer auf der Sichtfläche befinden bzw. ob trotz Kratzern die einwandfreie Sicht sichergestellt ist.

Das Gesichtsschild muss auf Risse überprüft werden. Sollten Risse im Gesichtsschild festgestellt werden, können die Schutzeigenschaften nicht mehr sichergestellt werden.

Das Gummiband muss auf Einschnitte überprüft werden, damit sichergestellt werden kann, dass es bei Belastung nicht reißt.

Desinfizierung

Zur Desinfizierung kann das Gesichtsschild mit handelsüblichen Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Anwendung

Das Gesichtsschild soll das Gesicht des Trägers vor Gegenständen schützen.

Eigenschaften

Dieses Augenschutzgerät (Schutzbrille, Gesichtsschutzschild) bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkungen.

Kombinierbar mit Gesichtsschutzmasken.

Nach Gebrauch entsorgen. Eine Wiederverwendung liegt im Ermessen des Verwenders.

Kein Zubehör und keine Ersatzteile vorhanden.

Risikobeurteilung

Dieses Augenschutzgerät bietet keinen Schutz gegen Strahlungsarten (z.B. Sonnenstrahlung, UV, Schweißen, IR).

Dieses Augenschutzgerät ist nicht feuerresistent.

Dieses Augenschutzgerät ist nur zur Anwendung bei Raumtemperatur.

Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.

Kein beschädigtes Augenschutzgerät verwenden, es kann die Sicht und den Schutz beeinflussen.

Wenn das Augenschutzgerät beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden.

Verfallszeit

Die Verfallszeit der PSA liegt bei 5 Jahren.

Verordnungen

PSA Verordnung (EU) 2016/425

Sichtscheiben gemäß EN 166: 2001

EU-Konformitätserklärung (einsehbar auf <https://www.sprintis.de/>)

Notifizierte Stelle

MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD.

Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No.21

Ataşehir/İstanbul, Turkey

(Notified Body No.: 2841)

Kennzeichnung

SPRINTIS CE (SPRINTIS=Herstellerkürzel, CE=Europäische Konformität).

1.

PSA (Produkt-, Typen-, Chargen- oder Seriennummer):
Gesichtsschild Artikelnr.: SIPERPLAS - 01

2.

Name und Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten:
Plasser Plastik ve Kalip San. Tic. Ltd.
Rami Kýmpla Cd. Apek Üretmen Yp Merkezi
35050 Istanbul

3.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:
Plasser Plastik ve Kalip San. Tic. Ltd.
Rami Kýmpla Cd. Apek Üretmen Yp Merkezi
35050 Istanbul

4.

Gegenstand der Erklärung:
Gesichtsschild SIPERPLAS - 01



5.

Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechts vorschritten der Union:
PSA Verordnung 2016/425/EU

6.

EN 166: 2001

7.

Die notifizierte Stelle

MNA LABORATORIES IND.TRADE.CO.LTD.
Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No.21
Ataşehir/İstanbul, Turkey
(Notified Body No.: 2841)

hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung 39-20-01 ausgestellt.